



Remplace les bandes de repos
Optimisation de la
récupération
Encombrement réduit

Le tube compressif

- Offre un meilleur soutien que les bandes de repos classiques
- Permet une compression de 20-30 Mm Hg au niveau du boulet
- Tissus antibactérien
- Conçu sans armature
- N'entraîne pas de frottements ou de perte de poil
- Présente une coupe confortable au niveau du paturon

Le tube compressif

- Est respirant
- Disperse la chaleur
- Evacue l'humidité
- Sèche rapidement
- Est lavable en machine

Fabriqué aux USA
Avec des matériaux recyclables



**MERCI DE LIRE TOUTES
LES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION**

MESURER VOTRE CHEVAL



Les mesures à prendre sur votre cheval :

LONGUEUR : Le long de l'os canon jusqu'au-dessus du point médian de la zone du paturon (flèche jaune)

HAUT : Circonférence de l'os canon (flèche rouge)

BAS : Circonférence au niveau de la partie la plus large du boulet (flèche bleue)

GUIDE DES TAILLES (en cm)

Tailles	LONGUEUR	HAUT	BAS
S ANTERIEUR	24 cm	20,5	26,5
M ANTERIEUR	25,5 cm	21,5	28
L ANTERIEUR	26,5 cm	24	12,5
XS POST.	24 cm	20,5	26,5
S POST.	28 cm	24	30,5
M POST.	30,5 cm	24	30,5
L POST.	33 cm	26,5	33

Tailles en centimètres

IL N'Y A AUCUNE DIFFERENCE DE MATIERE OU DE CONCEPTION ENTRE LES MODELES ANTERIEURS ET POSTERIEURS. CHOISIR LA TAILLE QUI SE RAPPROCHE LE PLUS DES MESURES DE VOTRE CHEVAL.

ENTRETIEN DES TUBES
COMPRESSIFS

- Pour préserver les ourlets et coutures du modèle, il est conseillé de replier les extrémités hautes et basses des tubes compressifs avant de les retirer.
- Lavage en machine en cycle délicat/laine, sans javel.
- Séchage à basse température.

Une bande colorée située à l'intérieur de l'ourlet inférieur rappelle la taille du modèle :

- jaune – Small (S) Antérieur / Extra Small (XS) Postérieur
- Bleu clair – Medium (M) Antérieur
- Orange – Large (L) Antérieur
- Noir – Small (S) Postérieur
- Rouge – Medium (M) postérieur
- Vert – Large (L) Postérieur



Remplace
les bandes de repos !



Le Paturon, revendeur exclusif :
France, Allemagne, Suisse, Espagne,
Italie, Belgique, Luxembourg



**REPLACE LES BANDES
DE REPOS POUR LES
ANTERIEURS ET
LES POSTERIEURS !**



WATCH VIDEO:
www.flexsleeve.com

**POSER LES TUBES
COMPRESSIFS :**

- *Bien nettoyer et brosser le membre.*
- *Prendre le membre et placer un sac plastique sur le sabot.*
- *Glisser entièrement le tube compressif sur la jambe en le passant au dessus du sac plastique puis retirer le sac et reposer le membre du cheval au sol.*

Attention : veiller à positionner le tube compressif dans le bon sens : les chevaux représentés sur le logo du produit doivent toujours regarder vers le haut de la jambe !

POSITION CORRECTE



Antérieur

Postérieur

- *Tirer le tube compressif vers le haut de la jambe au delà de la position définitive,*
- *Puis le glisser vers le bas, dans le sens du poil dans la position désirée.*
- *Vérifier ensuite qu'il n'y ait pas de fronces ou de plis.*

**RETIRER LES TUBES
COMPRESSIFS :**

- *Pour préserver les ourlets et coutures du modèle, il est conseillé de replier les extrémités haute (vers le bas) et basse (vers le haut) des tubes compressifs avant de les retirer.*
- *Faire glisser le tube compressif le long de la jambe jusqu'au sabot.*
- *Soulever la jambe du cheval puis retirer le tube compressif par le devant du sabot (comme pour retirer une cloche).*

**DEMANDEZ A VOTRE VETERINAIRE SI
EQUIFLEXSLEEVE EST ADAPTE
A VOTRE CHEVAL.**

L'utilisateur des tubes compressifs Flexsleeve est entièrement responsable de l'utilisation correcte du produit.

L'usage des tubes compressifs Flexsleeve ne se substitue pas aux conseils d'un vétérinaire.

**TUBES COMPRESSIFS :
GUIDE D'UTILISATION
ET PRECAUTIONS**

- *Les tubes compressifs sont destinés à être utilisés à la place de bandes de repos dans un environnement sec.*
- *Les tubes compressifs peuvent être laissés en place jusqu'à trois jours. Il est néanmoins conseillé de les retirer au bout de 10 à 12 heures.*
- *Les tubes compressifs ne doivent pas être utilisés sur des chevaux présentant des engorgements sévères.*
- *Les tubes compressifs ne doivent pas être posés sur un membre sale, une plaie ou sur une surface présentant des signes d'infection.*
- *Les tubes compressifs ne doivent pas être utilisés pendant le travail, l'entraînement ou la compétition.*
- *Les tubes compressifs ne sont pas guêtres de protection des membres.*

NOTE: les tests ont montré que chez la plupart des sujets, le port des tubes compressifs pendant la nuit ne présentait aucun problème. Certains chevaux joueurs ou curieux peuvent pousser les tubes vers le bas mais cela est sans risque. Le principe compressif est lié à la taille du boulet et la compression est beaucoup plus faible le long du canon. Une surveillance est conseillée pour la sécurité de votre cheval.